



可置放轮椅的无障碍车辆操作方法

英用提手。 用提手

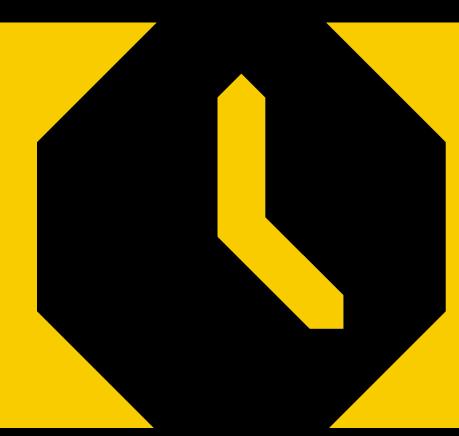


不要着急!

使用全部六根安全带。请勿使用损坏的设备。

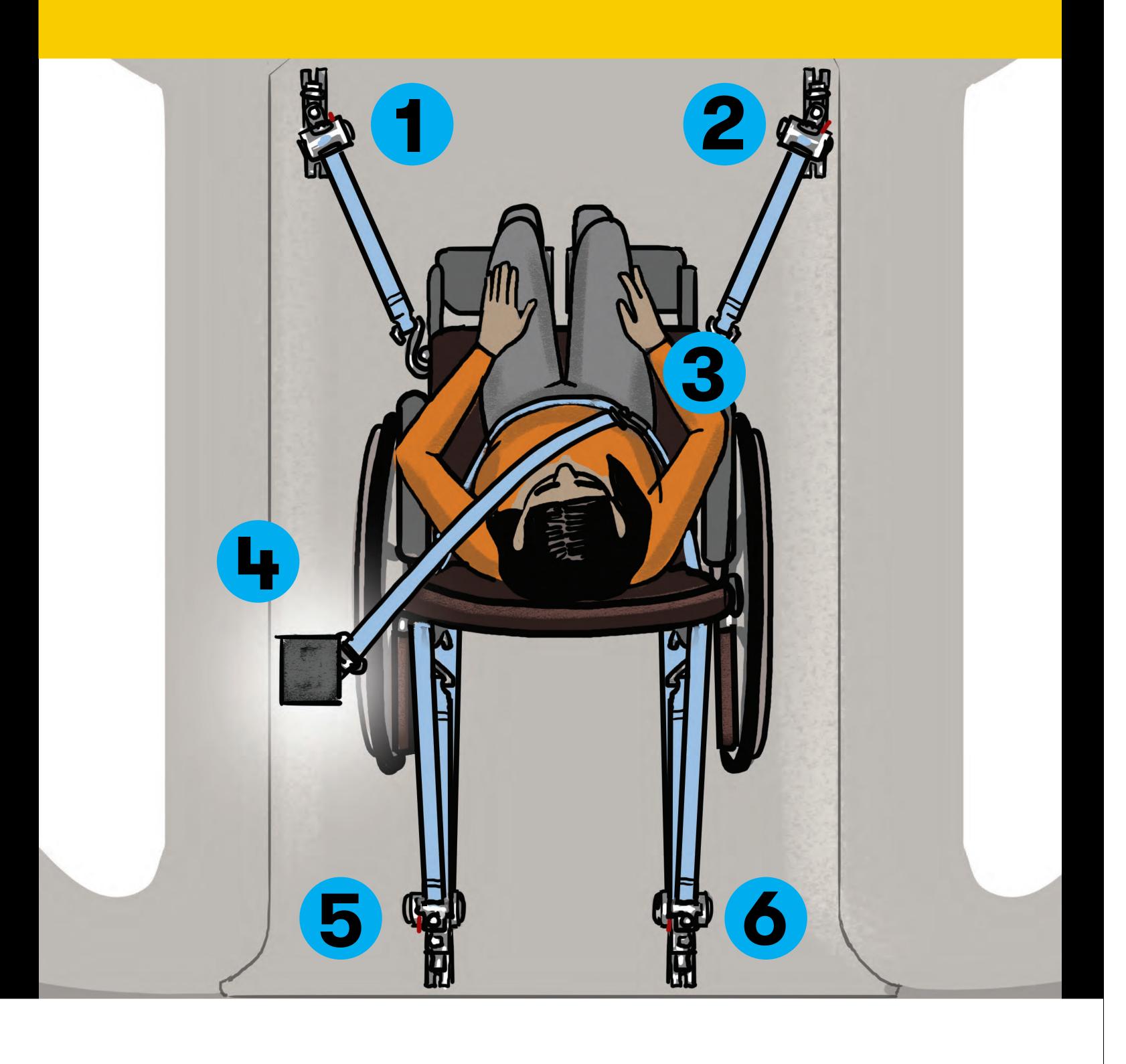

告诉乘客您正在做什么。

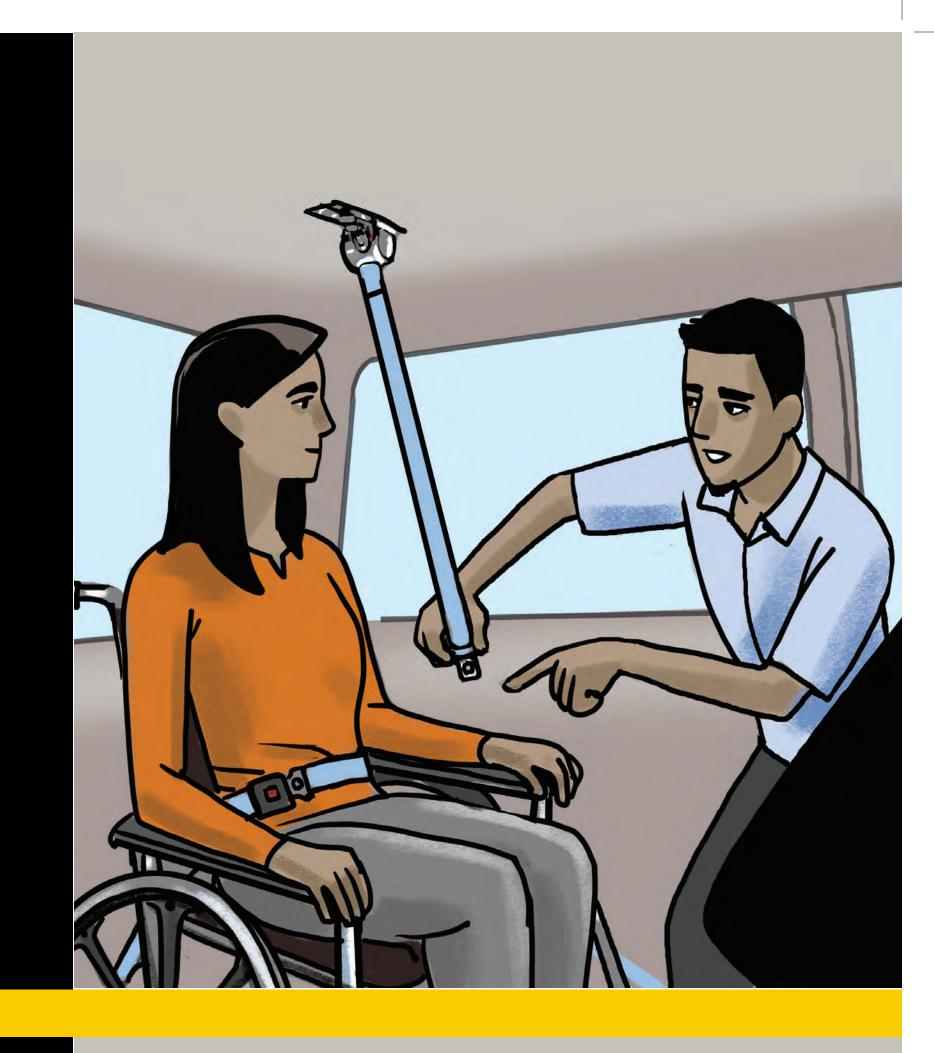

听取乘客的意见。




保持车辆清洁。




古手步骤

将前固定件滑入轨道。

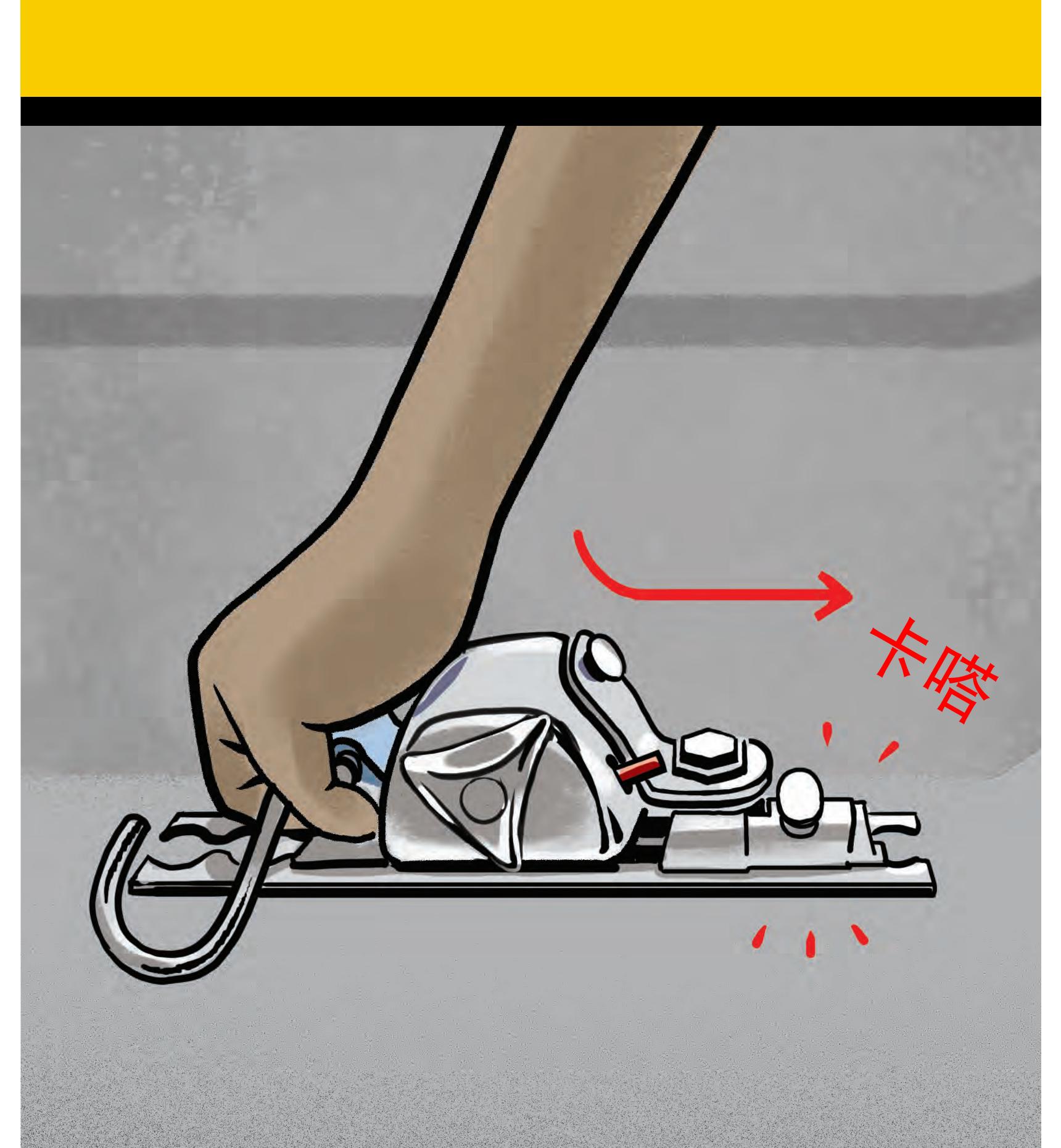


将挂钩连接到固定点。

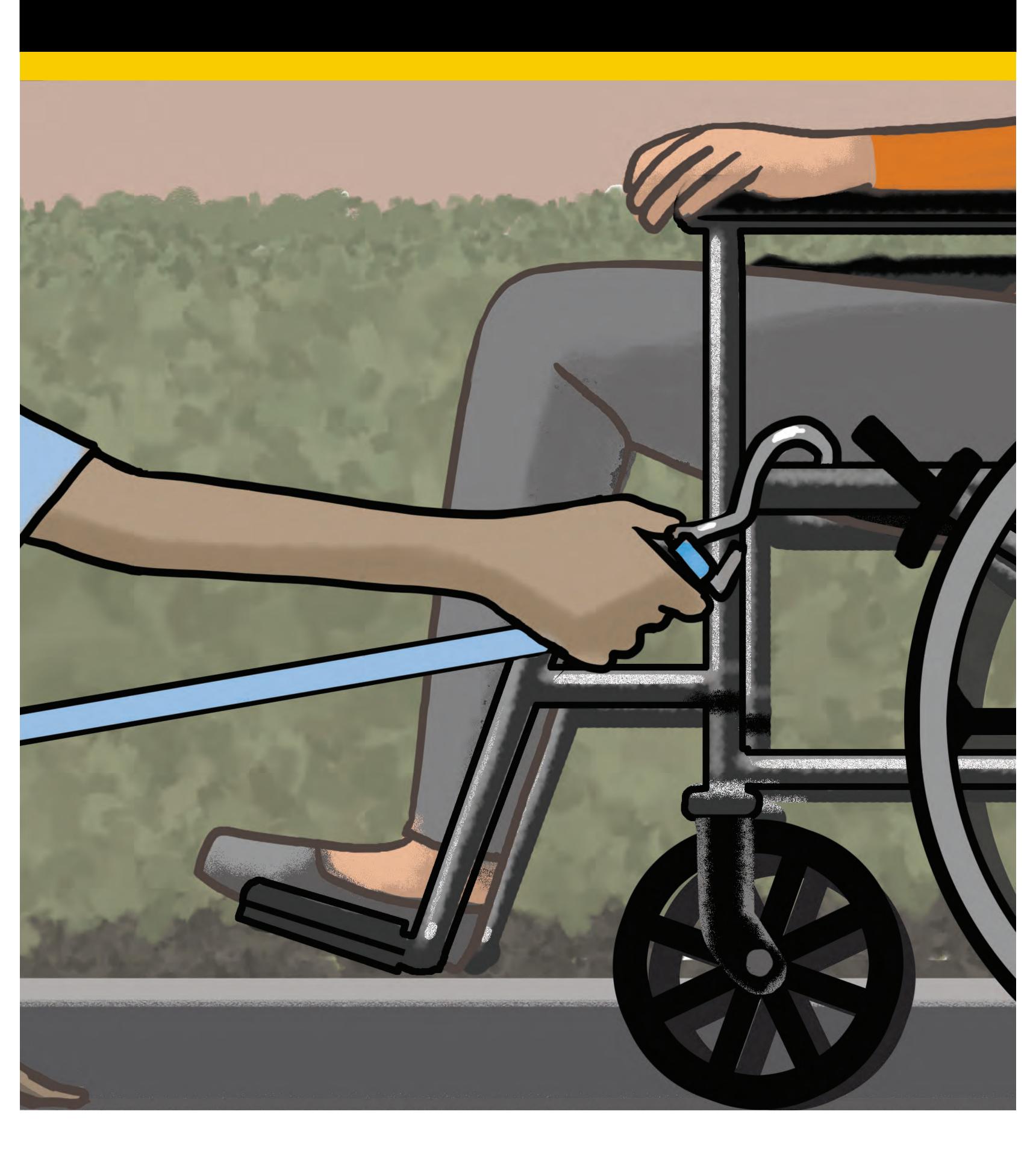


3 协助乘客上车。




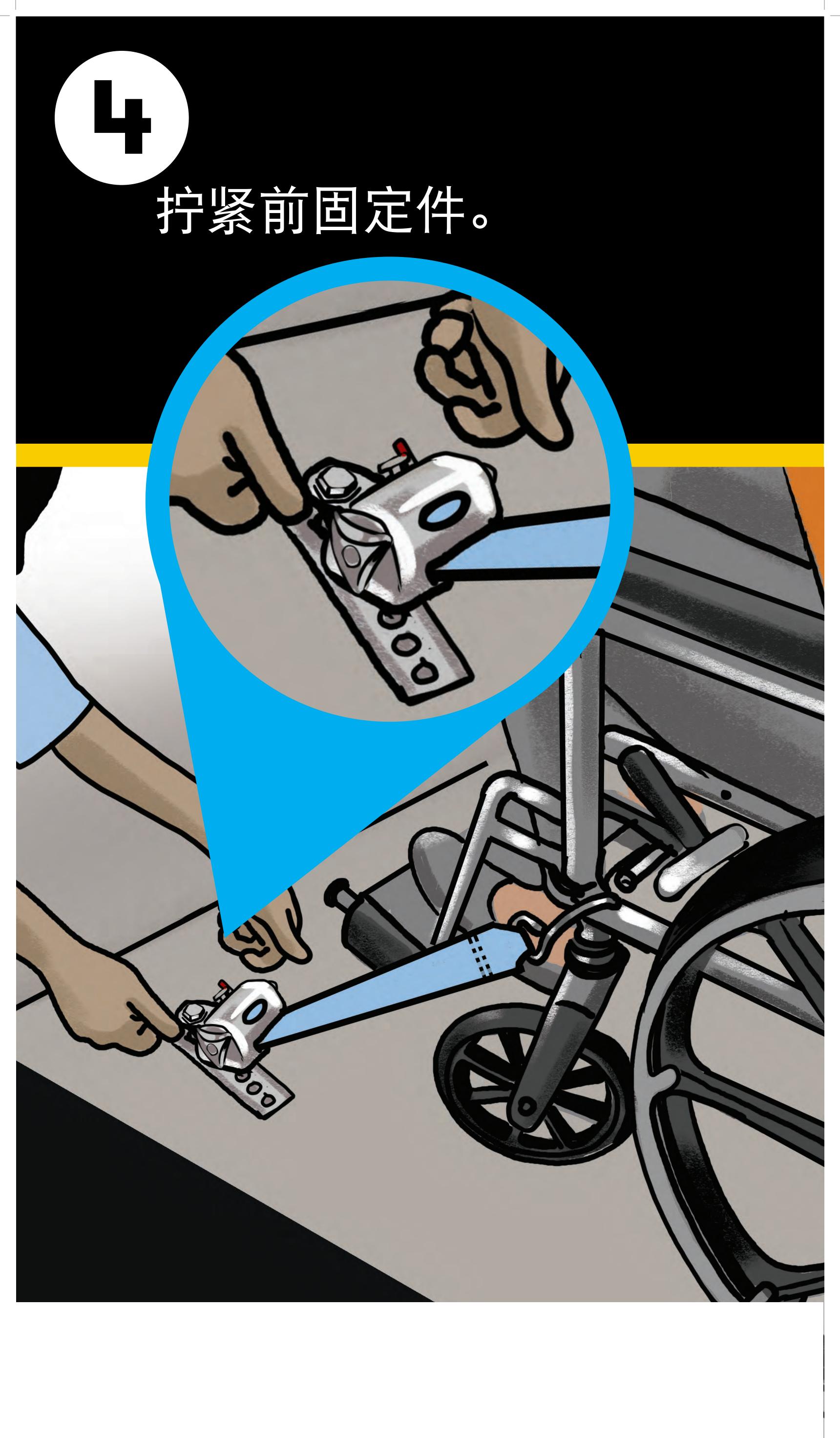


5 锁定刹车。

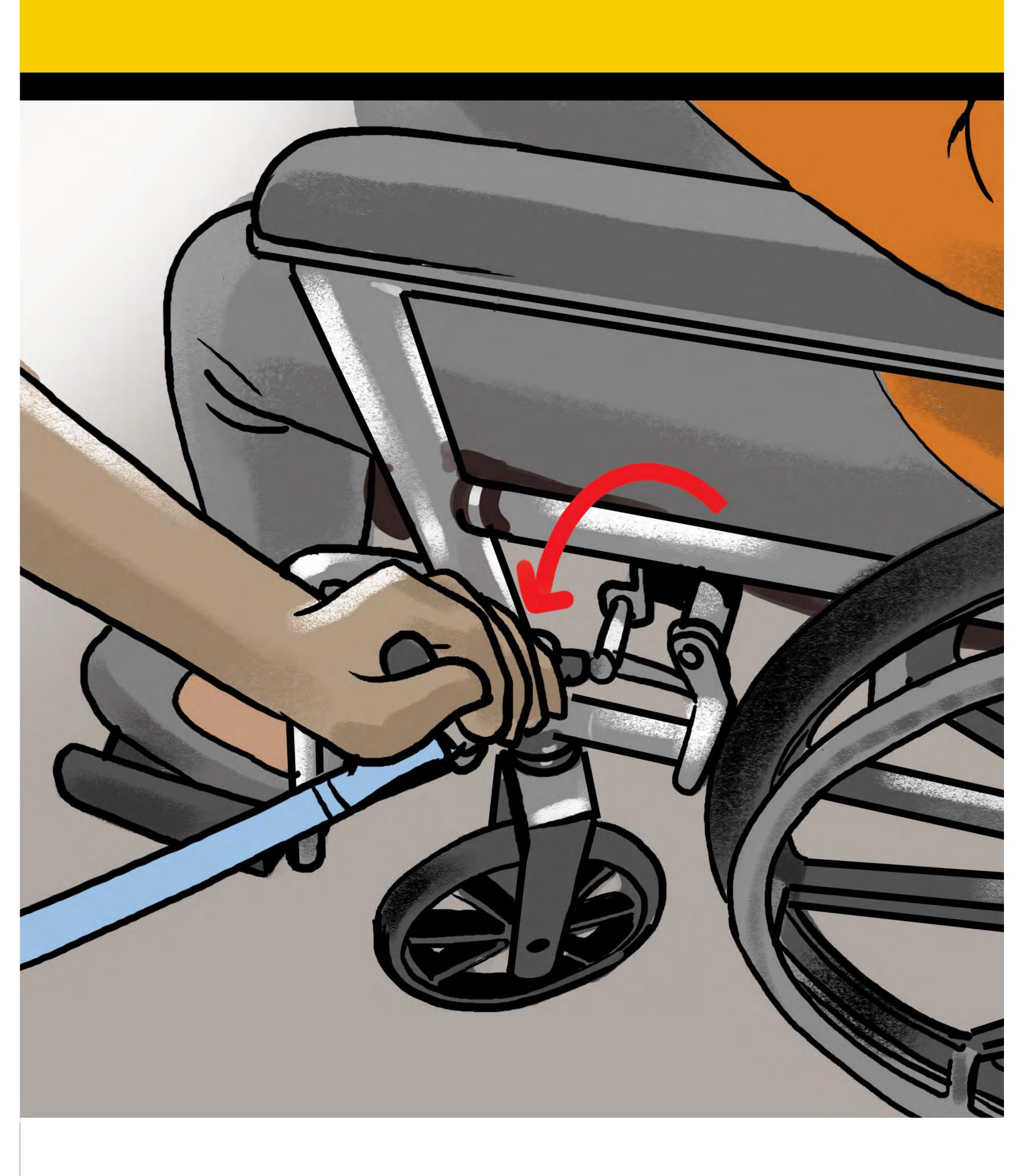

将后固定件滑入轨道。

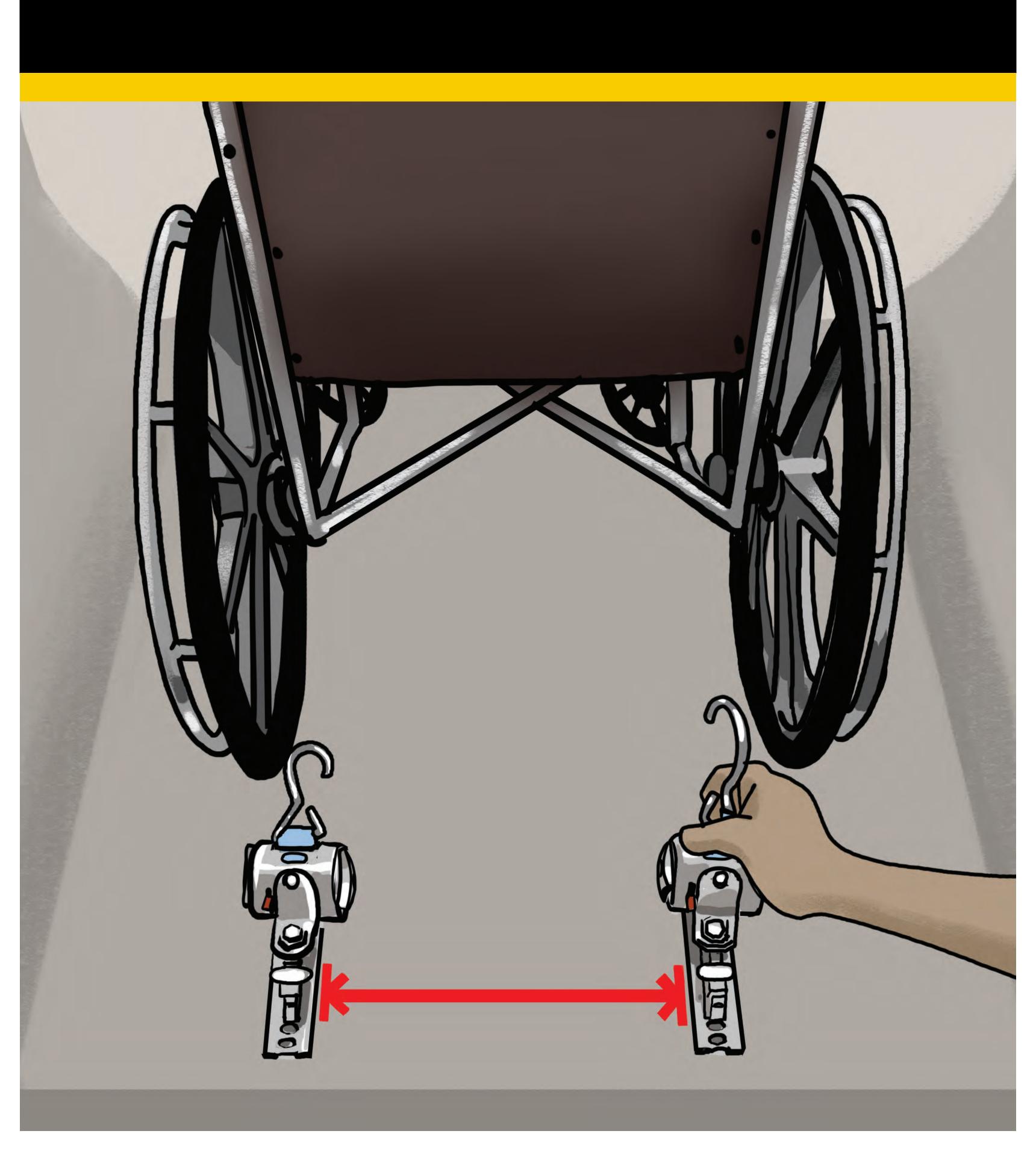

将安全带钩在轮椅靠背上,并拉紧。

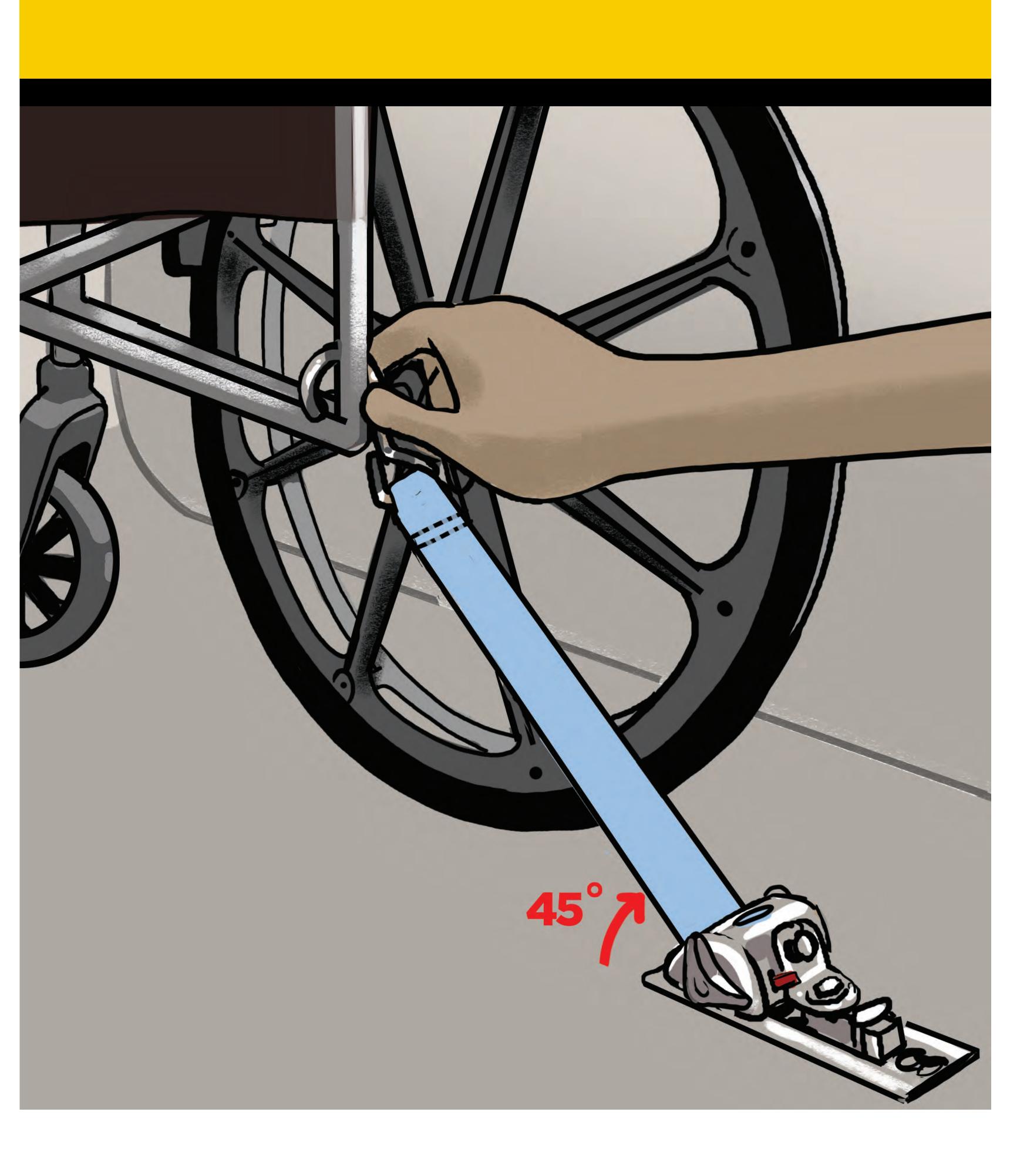


将腿部安全带横跨过乘客大腿固定。红色按扣应位于右髋一侧。

8



将腿部安全带连接至后固定件。

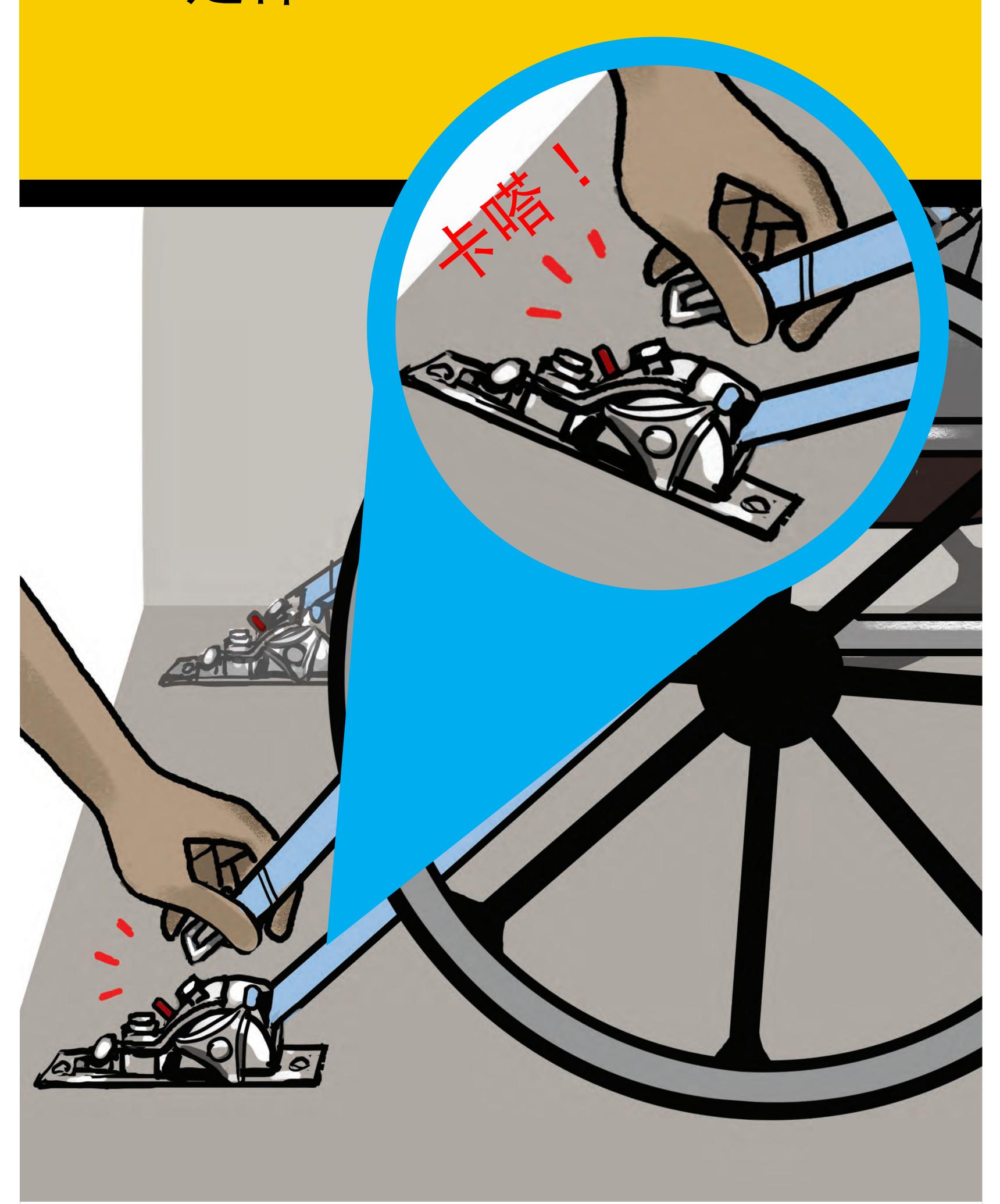






收紧腿部安全带。



连接肩部安全带。



收紧肩部安全带。

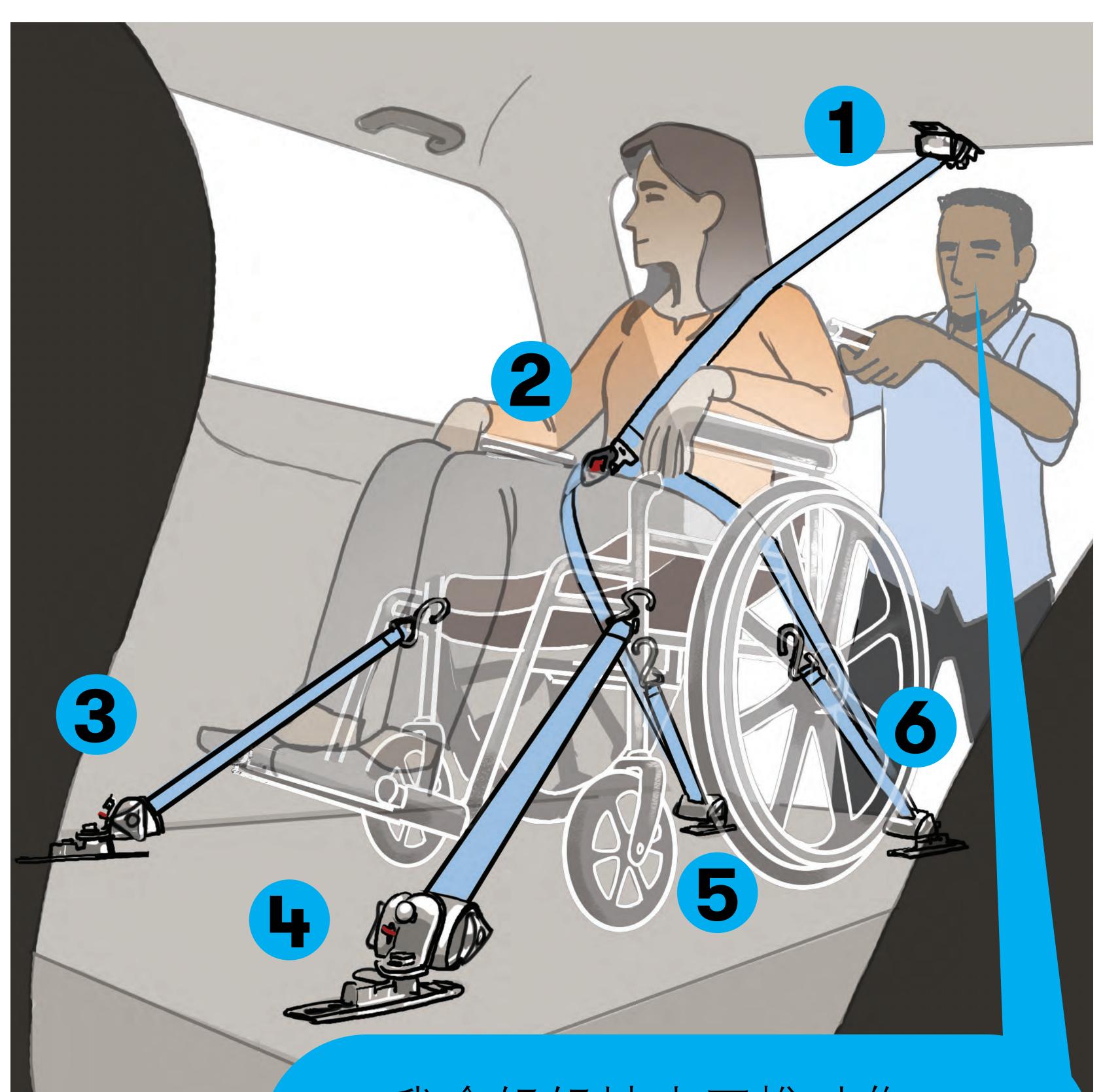

我会轻轻地来回推动你, 以确保你已经固定。

测试固定件 - 轻轻推拉轮椅,确保固定件将乘客固定在适当的位置。

CNYCTLC
Education
COmmission

Taxi & Limousine
Commission