


9

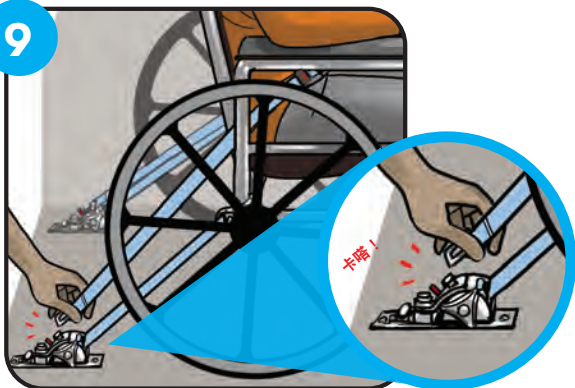

将腿部安全带连接至后固定件。

10



你觉得舒适吗?

收紧腿部安全带。

11




连接肩部安全带。

12



收紧肩部安全带。

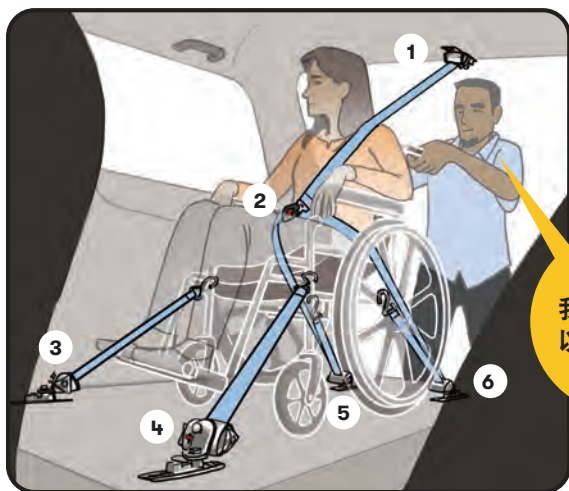

测试固定件 - 轻轻推拉轮椅，确保固定件已将乘客固定。

我会轻轻地来回推动你，以确保你已经固定。

你已经准备好出发了！




# 可置放轮椅的无障碍车辆操作方法



## 实用提示

不要着急！慢慢来。

使用全部六根安全带。请勿使用损坏的设备。

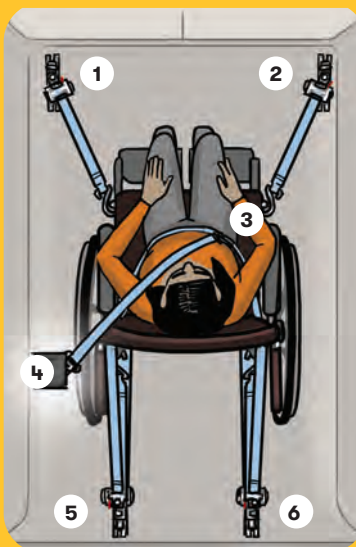

我要把肩部安全带固定在腿部安全带上...

告诉乘客您正在做什么。



你能让这根腿部安全带松一些吗?

听取乘客的意见。




保持车辆清洁。






## 上车

1

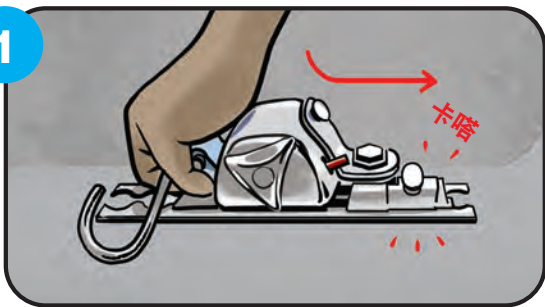

将前固定件滑入轨道。

2

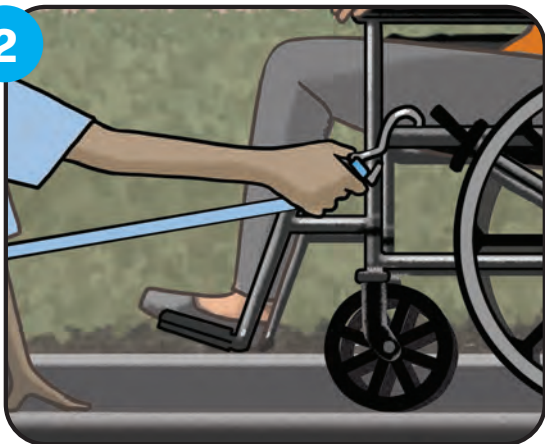

将挂钩连接到固定点。


3



协助乘客上车。


我可以帮你上车吗？

4

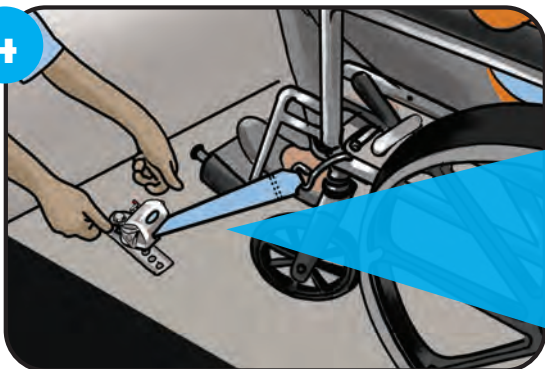

拧紧前固定件。


5

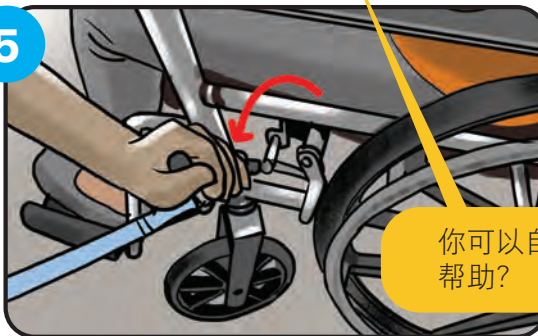

锁定刹车。


你可以自行锁定刹车，还是需要我的帮助？

6

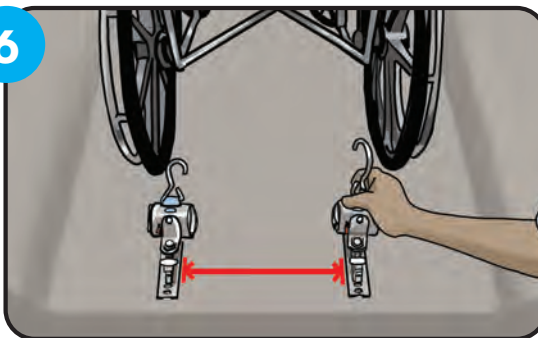


将后固定件滑入轨道。

7

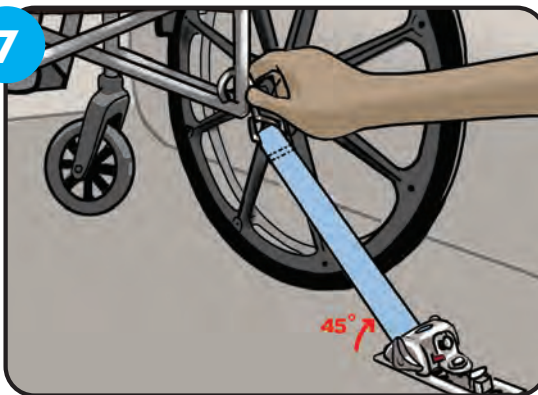

将安全带钩在轮椅靠背上，并拉紧。

8

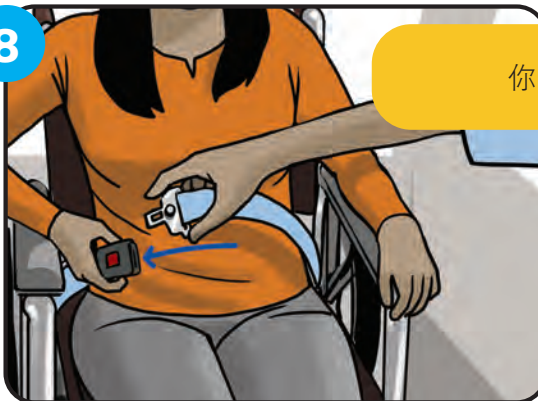

你能帮我把这个放好吗？

将腿部安全带横跨过乘客大腿固定。红色按扣应位于右髋一侧。