



بذریعہ ویل چیئر قابل رسائی سواری کا ہدایت نامہ

معاون تجاویز

اپنے مسافروں کو
بتائیں کہ آپ کیا کر
رہے ہیں۔

میں کندھے کی بیلٹ کو
گود کی بیلٹ کے ساتھ
باندھنے لگا ہوں۔



اپنے مسافروں کی
بات سنیں۔

کیا آپ اس گود کی بیلٹ کو
تھوڑا سا ڈھیلا کر سکتے ہیں؟




اپنی گاڑی کو صاف
رکھیں۔




عجلت نہ کریں!
اپنا وقت لیں۔

تمام چھ سکیورمنٹس پٹوں کا
استعمال کریں۔ ٹوٹے ہوئے
سازوسامان کا استعمال نہ کریں۔

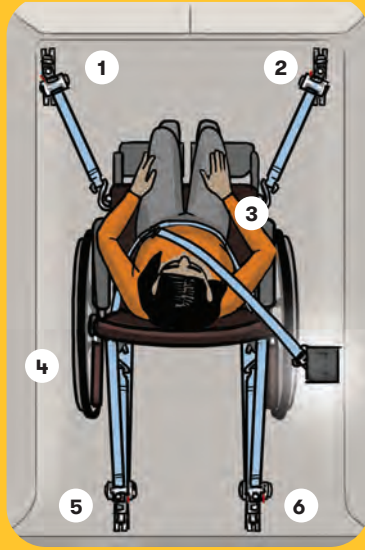

گود کی بیلٹ کو پچھلی جانب
لگی سکیورمنٹس سے
مربوط کریں۔

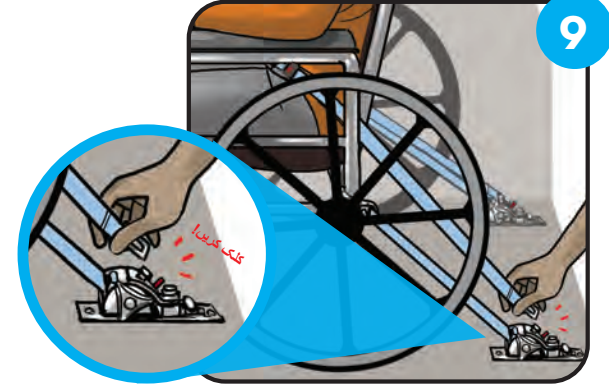


9



12

کندھے کے پٹے کو
کس دیں۔

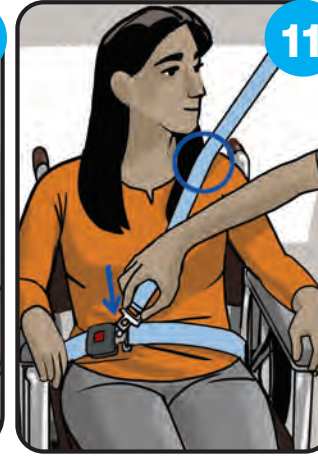

11

کندھے کے پٹے کو
مربوط کریں۔




10

کیا آپ پرسکون ہیں؟


گود کی بیلٹ کو کس دیں۔

سکیورمنٹس ٹیسٹ کریں -
اس امر کو یقینی بنانے کے لیے
سکیورمنٹس کو آرام سے آگے اور
پیچھے کی جانب دھکیلیں کہ مسافر
سکیورمنٹس کے ذریعے محفوظ ہو۔


میں احتیاط کے ساتھ آپ کو پیچھے
اور آگے کی جانب دھکیلوں گا تاکہ آپ
کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔

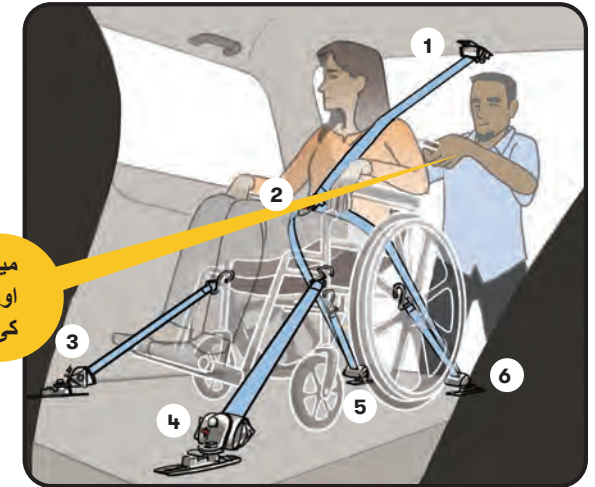

اب آپ سفر کے لیے تیار ہیں!

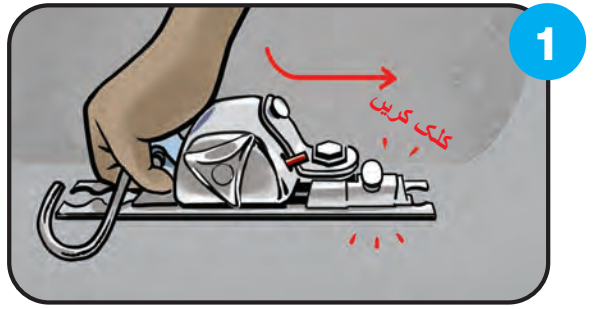

اگلی جانب لگی
سکیورمنٹس کو ٹریکس
میں سرکائیں۔

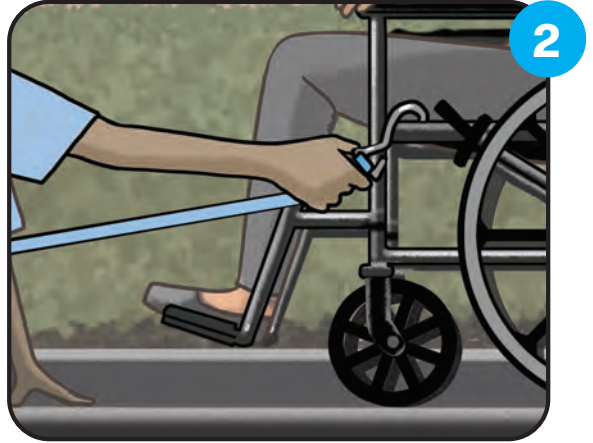


ہک کو سکيورمنٹ کے مقام
سے منسلک کریں۔




گاڑی میں بیٹھنے میں
مسافر کی مدد کریں۔

کیا میں سواری میں داخل ہونے میں آپ
کی مدد کر سکتا ہوں؟

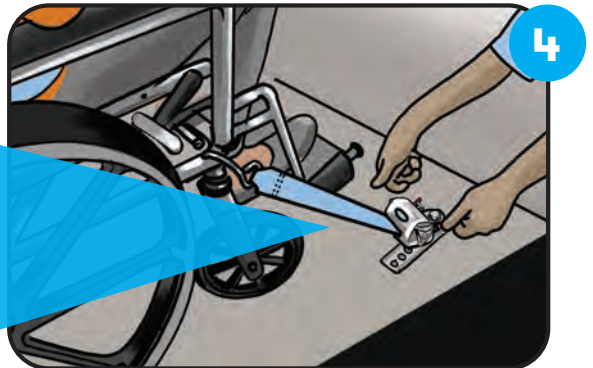


اگلی جانب لگی سکيورمنٹس
کو کس دیں۔

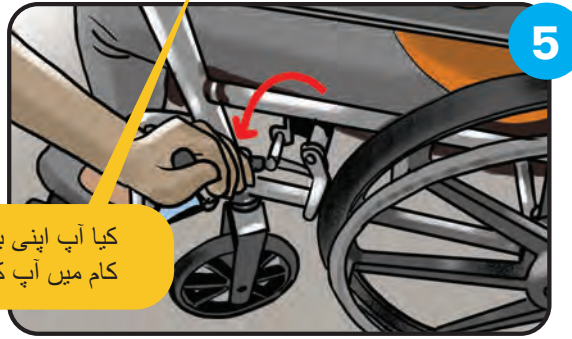


بریکس کو لاک کر دیں۔


کیا آپ اپنی بریکس لاک کر سکتے ہیں، یا میں اس
کام میں آپ کی مدد کروں؟

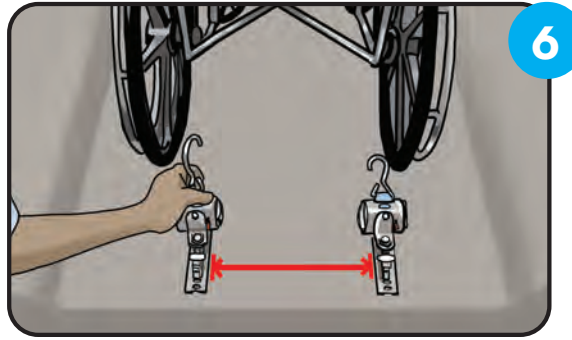

سکيورمنٹس کو پچھلی جانب
ٹریکس میں سرکائیں۔

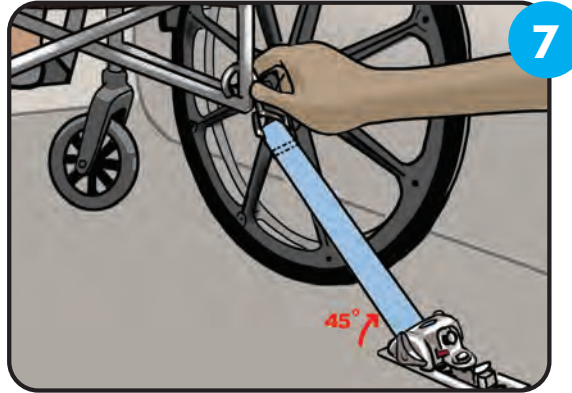

پٹوں کو ویل چینر کی پچھلی
جانب بذریعہ ہک لگائیں اور
کس دیں۔

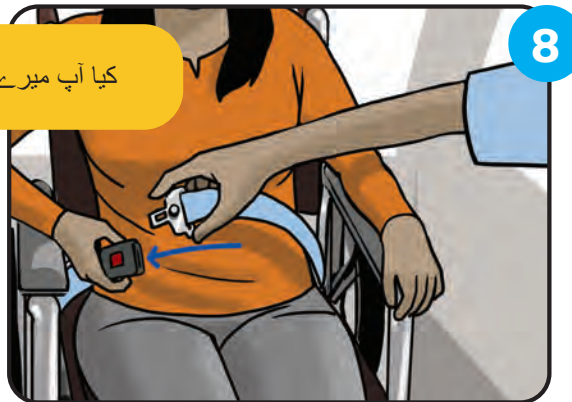

کیا آپ میرے لیے اسے پکڑ کر رکھ سکتے ہیں؟

گود کی بیلت کو مسافر کی گود
کے پار لگائیں۔ سرخ بٹن دائیں
کولہے کے پاس موجود ہونا
چاہیے۔